

すき間について


ベッドサイドレール・介助バーの使用に際して

■ まえがき


- ベッドをお使いになる前に、必ずこの「注意事項」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- ベッドを使用する方ばかりでなく、看護、介護する方も必ずこの「注意事項」をよくお読みください。
- ご使用になるベッド等の取扱説明書も必ずお読みください。
- この「注意事項」はお読みになった後も、ご使用になるベッド等の取扱説明書とともにいつでも見られる場所に保管してください。

■ ベッドサイドレール・介助バーの使用目的


- ベッドサイドレール及び介助バーはベッドのオプション取付孔に装着して使用する物です。

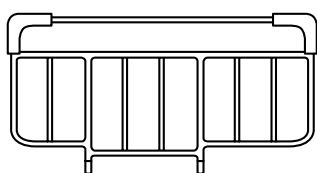

ベッドサイドレール（差込み式）

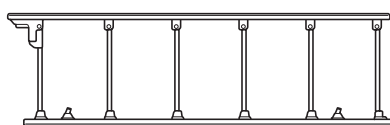

ベッドサイドレール（折りたたみ式）

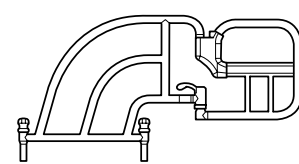

介助バー




ベッドサイドレールは、ベッドで寝ている人の転落や寝具の落下を予防するための製品です。

介助バーは、ベッド上での起きあがりやベッドからの立ちあがりなどの動作を補助するための製品です。

- これらの製品は、療養（利用）される方々の安全の確保やQOL（生活の質）の向上に役立っています。

■ すき間があります

- これらの製品は、用途により形状や構造が異なるため、いろいろなすき間を内包しています。また、こうした製品内部のすき間ばかりでなく、ベッド本体との組み合わせによっても同様のすき間が生じることになります。このようなすき間により、ベッド上で療養される方々の視野が確保されるとともに、閉塞感が軽減されています。しかしながら、これらのすき間に身体の一部がはさまれる可能性もありますので、裏面の注意事項を良くお読みください。

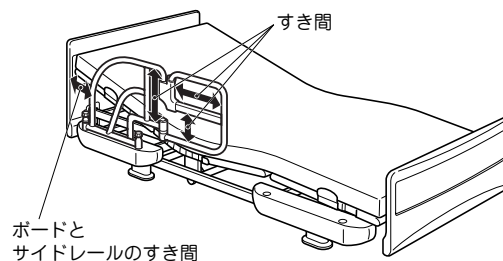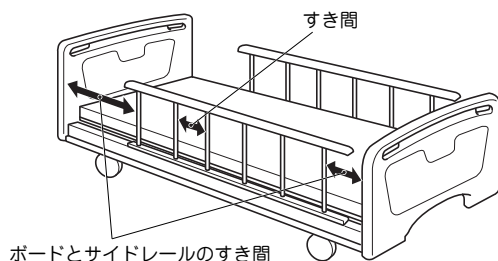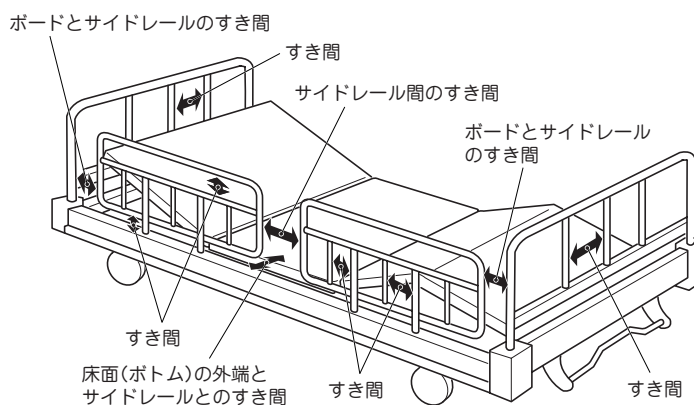

両面あり

すき間についての注意事項


ベッドサイドレール・介助バーの使用に際して

■ 使用上の注意


- 療養される方々の心身の状態や利用環境により、これらのすき間に身体の一部がはさまれたり圧迫される可能性があり、身体の傷害や生命にかかわる事故につながるおそれがありますので、十分ご注意ください。
- ベッド上で予測できない行動をとると思われる方や、自力で危険な状態から回避することができないと思われる方につきましては、これらのすき間に身体の一部（特に頭や首）がはさまれないよう十分ご注意ください。

はさまれ・圧迫に注意してください（図は一例です）


- 身体の一部（特に頭や首）がすき間に入ると抜けなくなり、身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがあります。

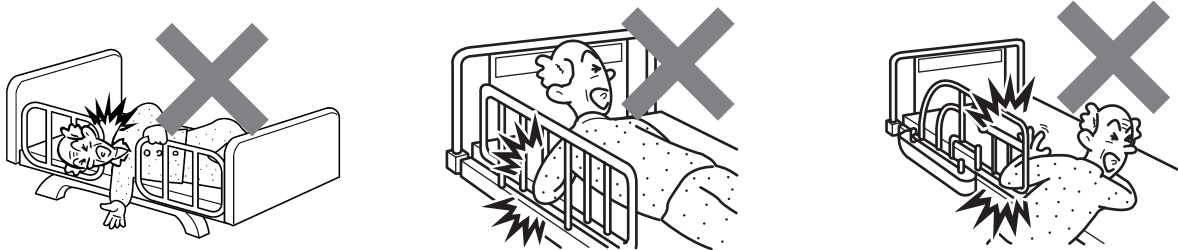

- 身体の一部（特に頭や首）がすき間に入った状態でベッドを操作すると挟まれて身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがあります。

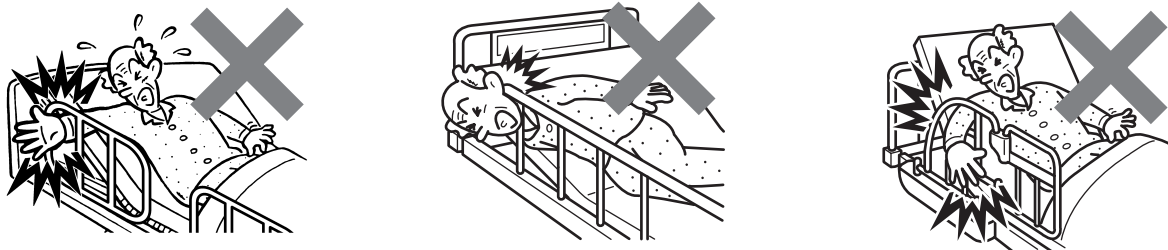

- 身体の一部（特に頭や首）がベッドサイドレールや介助バーにあたり圧迫されると身体の傷害や生命にかかわるけがをするおそれがあります。

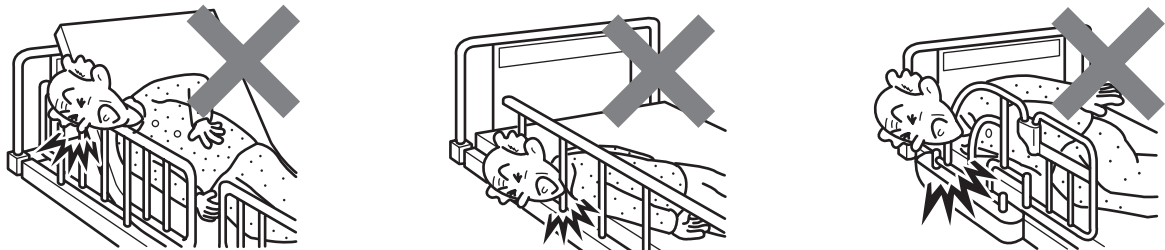

製品に関するお問合せ先

- 弊社ではすき間を少なくした製品や各種オプション（別売）がございます。詳しくはカタログをご覧ください。弊社までお問合せください。

パラマウントベッド株式会社 お客様相談室 **0120-03-3648**
 弊社ホームページ <http://www.paramount.co.jp>