

【重要】エマージェンシー・ストレッチャー(医療機器)の自主回収(改修)のお知らせ

(この情報は、医療施設での患者さんの搬送やX線撮影などに使用されることを目的に作られているエマージェンシー・ストレッチャー(医療機器)の自主回収(改修)に関するものです。当該製品を使用される関係全ての部署へ、早急にお渡しください。)

平成28年1月

お客様 各位

パラマウントベッド株式会社

1. 自主回収(改修)を致します理由について

弊社が製造販売致しております「エマージェンシー・ストレッチャー(KK-8000 シリーズ)」は、平成 27 年 12 月 15 日までに出荷した製品において、背ボトムを上下に操作しにくくなる、またはできなくなる可能性がある為、法的な回収手続きに基づき、自主回収(改修)を行わせていただきます。

2. 自主回収(改修)の対象：エマージェンシー・ストレッチャー(KK-8000シリーズ)

出荷を開始した平成 26 年 6 月から平成 27 年 12 月 15 日までに出荷した以下の機種

・KK-8010B、KK-8020B

・KK-8120B

・KK-8140B



KK-8010B、KK-8020B



KK-8120B



KK-8140B

3. 自主回収(改修)に関するお願い

- (1) この情報は、医療機関で使用される患者さんの搬送やX線撮影用の医療機器(エマージェンシー・ストレッチャー)の自主回収(改修)に関するものです。院内で本品をご使用になる可能性のある部・科に、本自主回収(改修)情報についてご徹底頂きますようお願い申し上げます。
- (2) 上記の該当する製品がある場合は、背ボトムの上下操作が著しく困難でないか点検してください。著しく困難な場合は、弊社までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
- (3) 本自主回収(改修)に当たり、貴院とご相談の上で作業日を決めさせていただき、1月下旬以降パラテクノ株式会社の修理担当者が訪問させていただきますので、ご協力をお願い申し上げます。

4. お問い合わせ先

本件に関しましてご不明な点などございましたら、弊社営業担当または、パラテクノ株式会社コールセンターまでお問合せください。

パラテクノコールセンター 0120-54-8639

受付時間 平日 8:00~19:00/土・日・祝日 9:00~17:20

以上